



Toma de Impresión de cubeta  
abierta con ferulización /  
Open Tray Impression  
technique for full arch  
splinting transfer

ZIACOM®

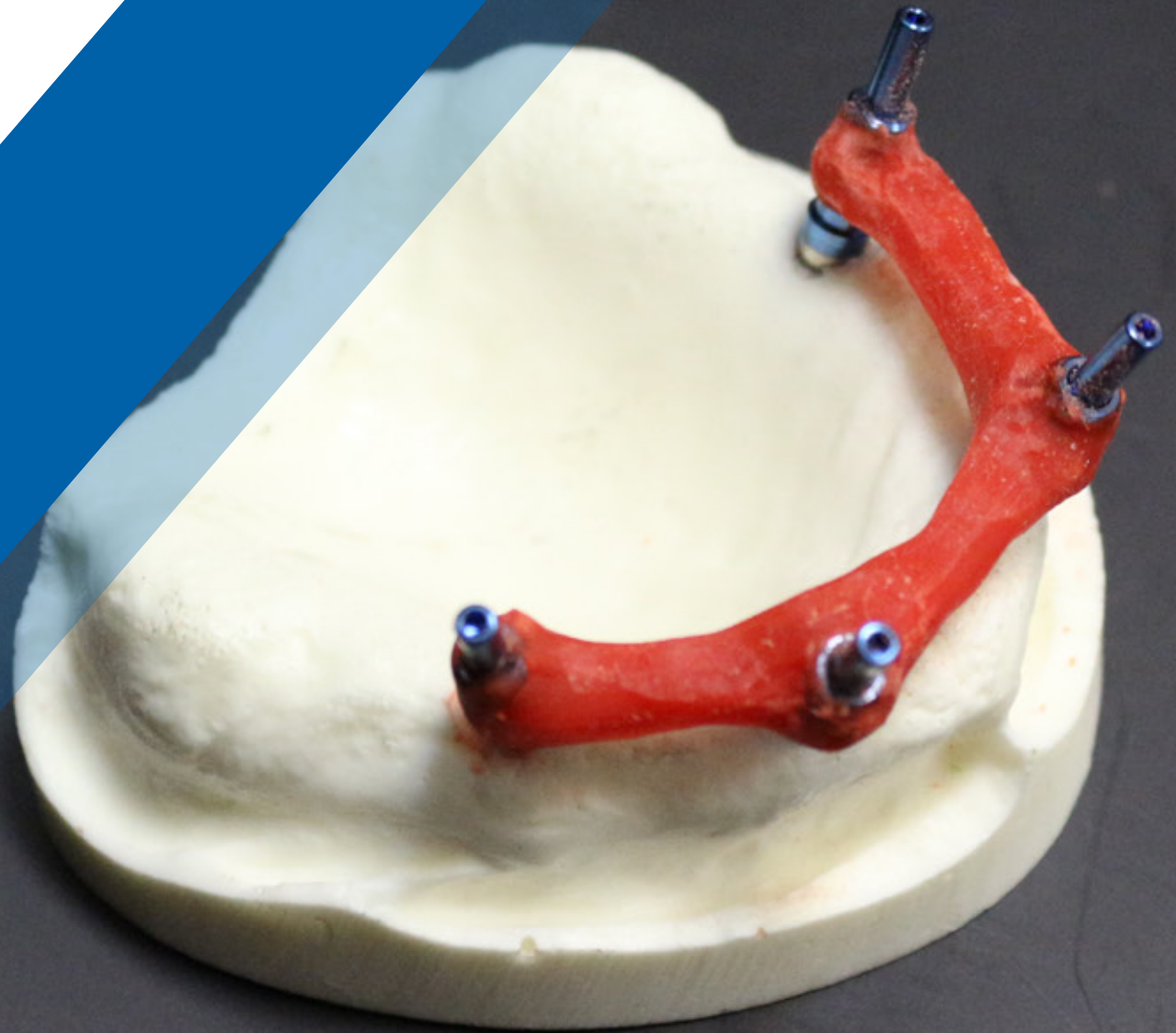


# ► Toma de Impresión

## Colocación de los transfer de impresión / Impression transfer placement

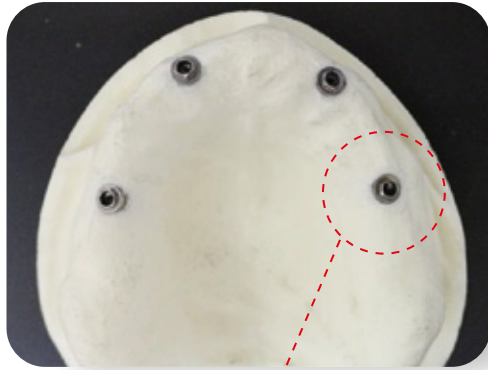


Implantes de hexágono externo  
Compatible / external hexagonal  
Implant connection

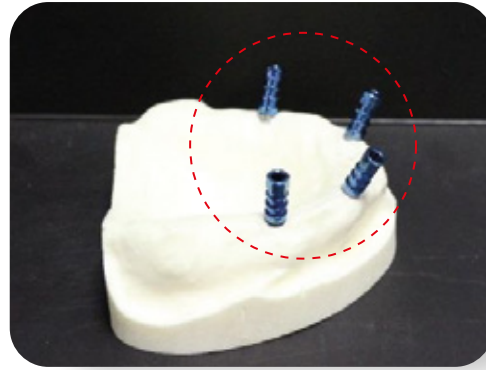


Zplus® transportador  
Multifunción como transfer de  
Impresion / Zplus® multifunction  
Mount as impression transfer

## Colocación de los tornillos y ajuste de la cubeta / Positioning the screws and adjusting the cube

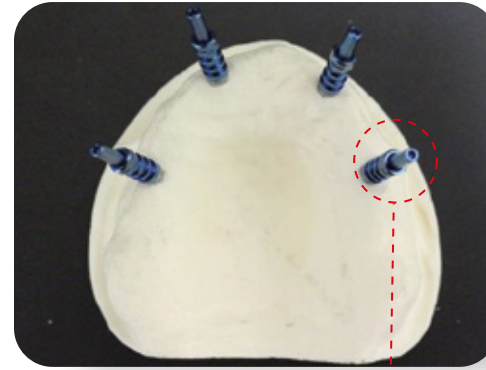


Colocación de tornillo de  
Impresión largo para técnica  
Cubeta abierta / long impression  
Screw placement for open tray  
Technique

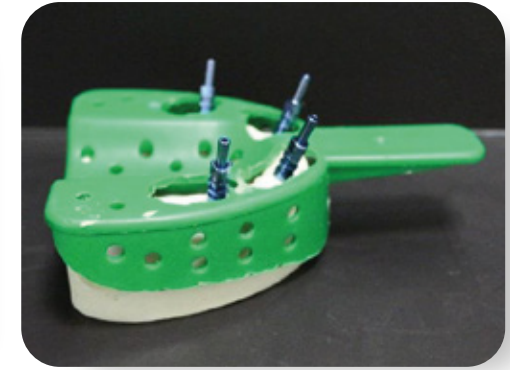


Preparación y ajuste de cubeta  
Abierta / tray drilling and  
Adjustment


## Ferulización de transfer con hilo dental y resina

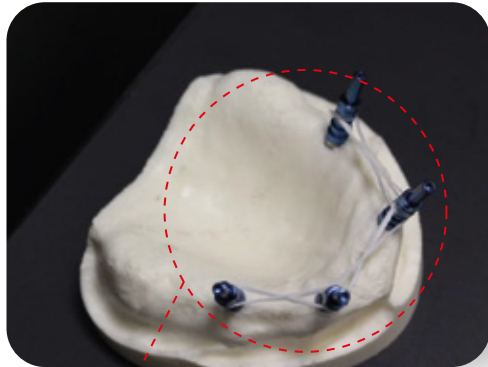

Enmallado con hilo dental /  
skip-knot with dental floss

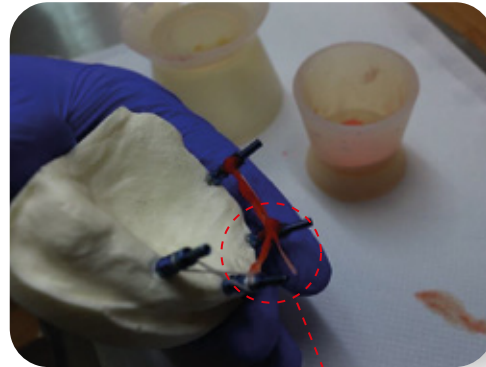

Coloque el polvo-líquido en el  
Hilodental entre dos transfer /  
Place liquid-powder droplet on  
The floss between transfer

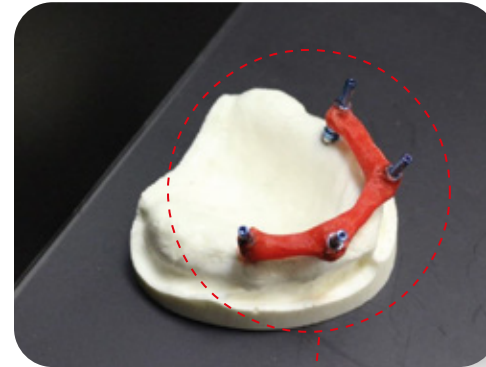

Ferulización con resina acrílica / resin splinting




# ► Toma de impresión


## Segmentado de la ferulización / Splinting segmentation




Utilice disco para segmentado  
(Alternativa: fresa de carburo de tungsteno)

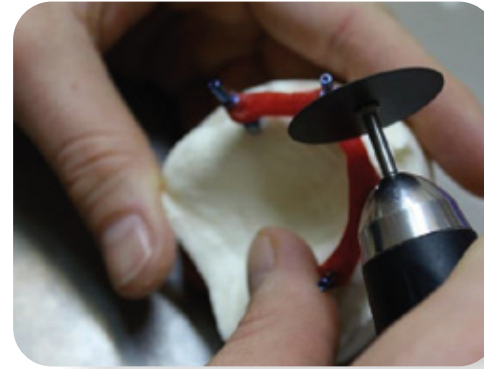

Use a disc for segmentation  
(Alternative: tungsten carbide bur)

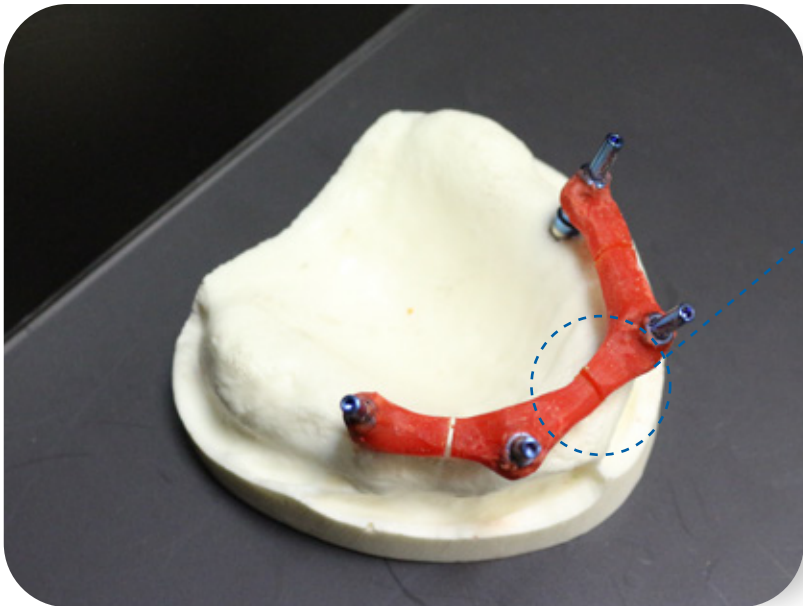

Segmentado de Resina para liberación De fuerzas de contracción / Splinting segmentation to release contraction Strength

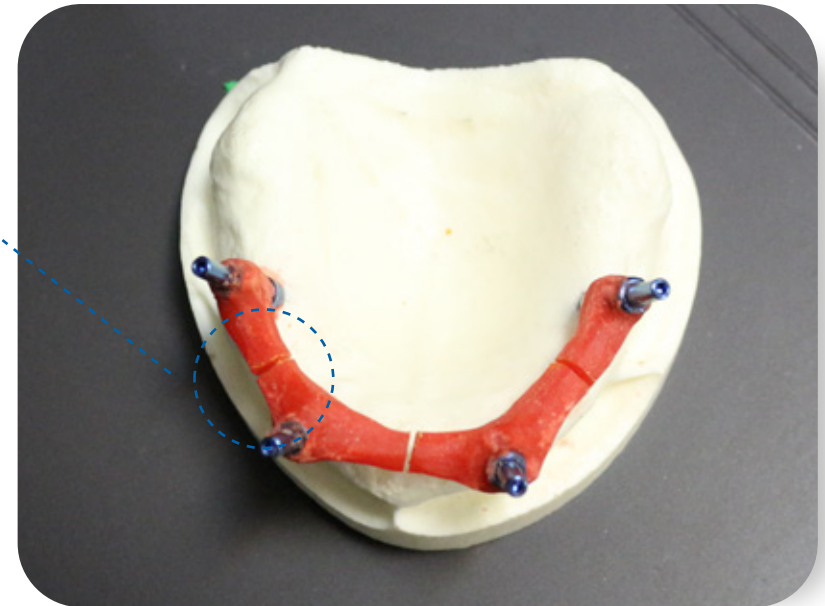




# ► Toma de impresión



## Preparación del material de impresión / impression material set up



## Toma de impresión / impression - taking

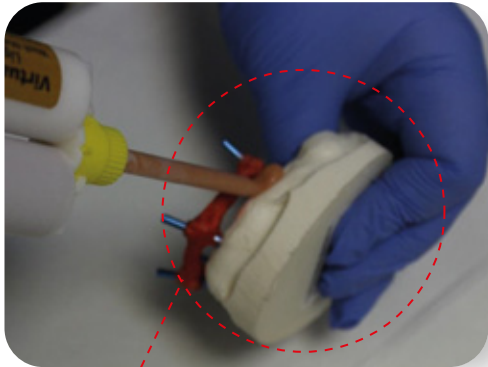




Colocación de material liviano /  
ligh body material placement

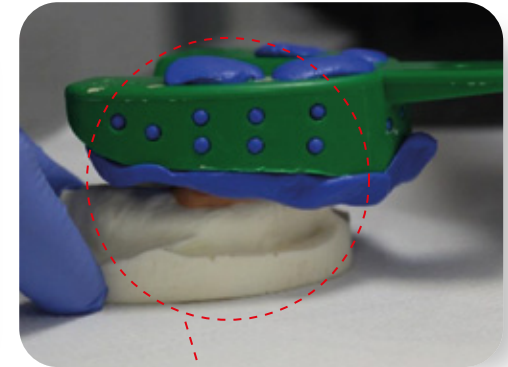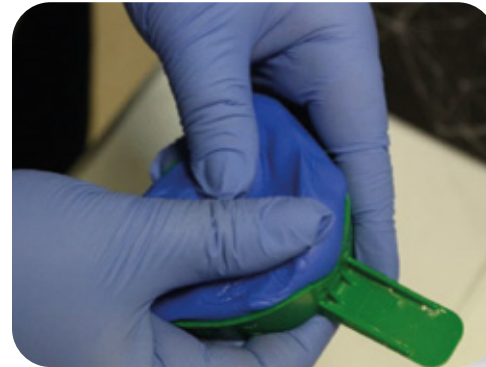

Asentamiento de la cubeta  
Con material pesado / tray placement  
With putty body



# ► Toma de impresión

## Toma de impresión / impression taking

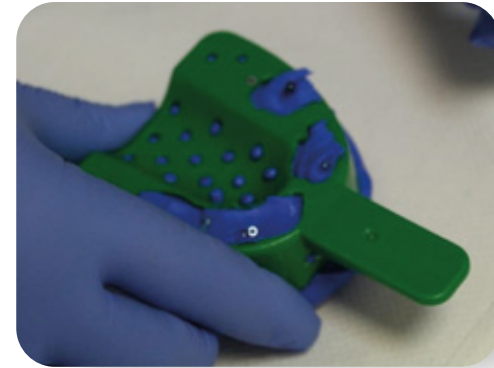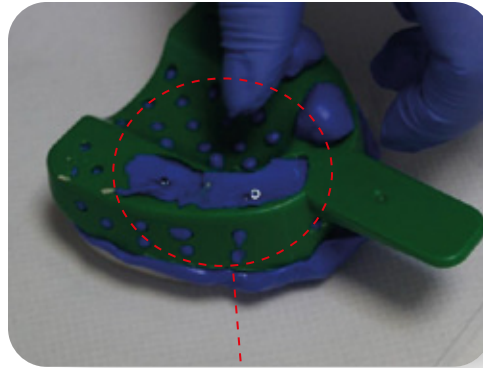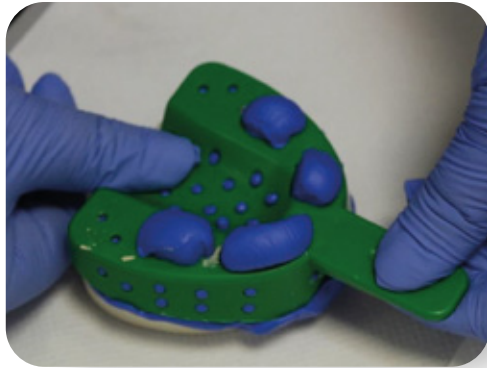


Retiro de excesos para descubrimiento y retiro de tornillos /  
Excess eliminate for screw discovery and removal

## Colocación de los análogos y fijación con tornillo / Analogues placed and fixation with screw

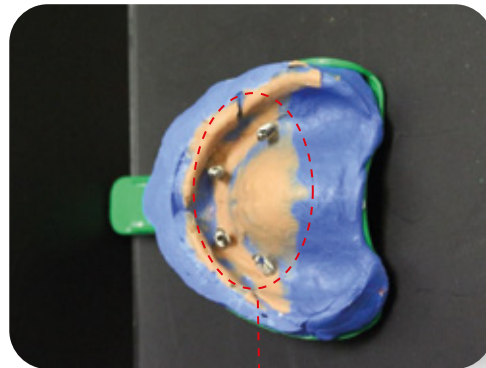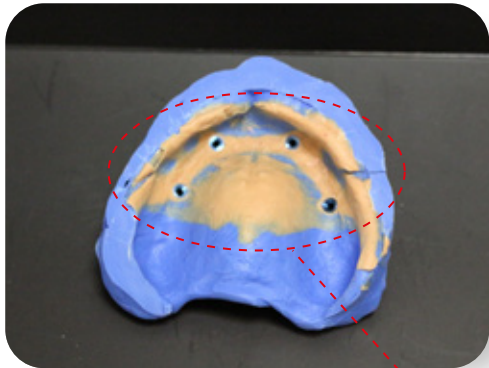




Colocación de análogos sobre transfer y fijación con tornillo  
De impresión para vaciado / analogues placed over transfer and  
Fixed for casting

## Modelo de trabajo en yeso / Plaster cast model

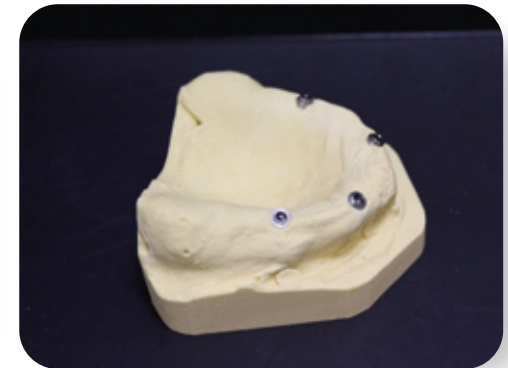

# ► Toma de impresión

Verificación en laboratorio de toma de impresión con ferulización /  
Laboratory splinting check

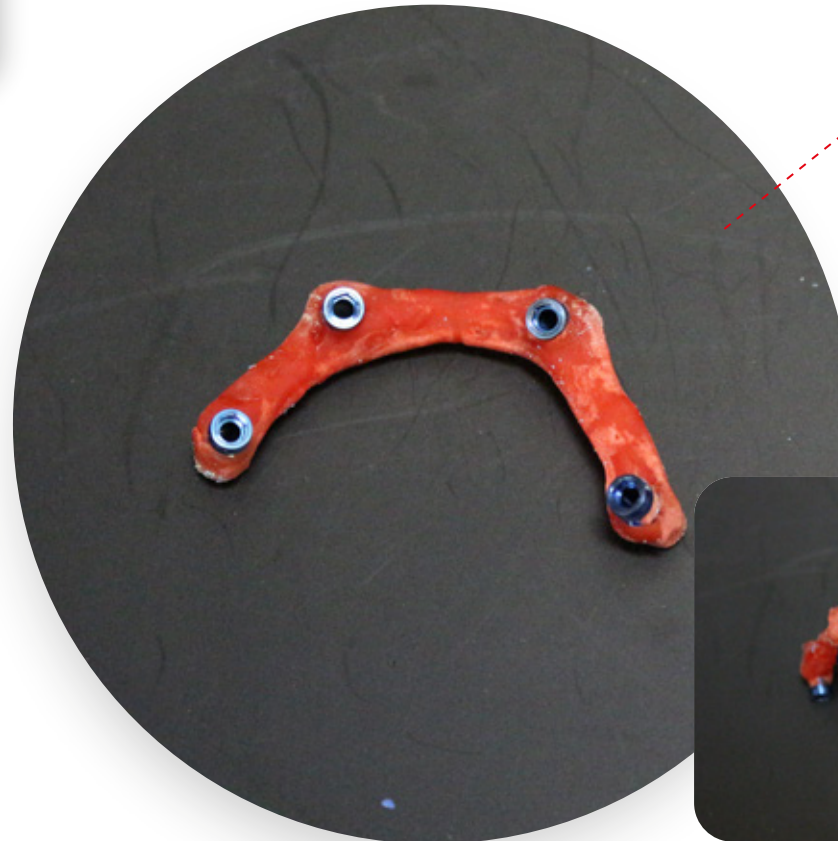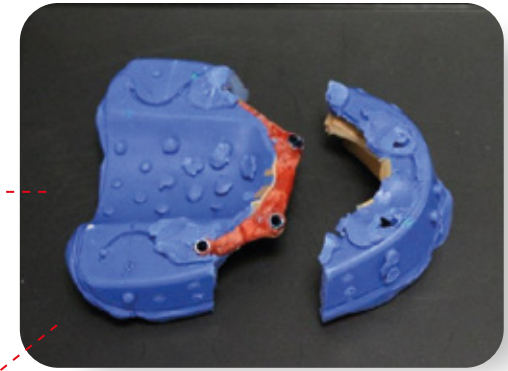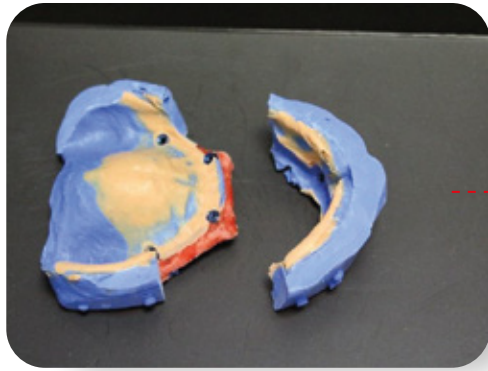



# Toma de Impresión de implantes de conexión Externa con ferulización



Prodecimientos  
Prostodoncia