

Caso clínico 2

Fase Quirúrgica / Surgical Phase

Colaboración:

Dr. Juan Manuel Aragonese

Clínica MilaDental - Madrid



- Género: Masculino
- Edad: 36 años
- Tratamiento: Colocación de Implante inmediata elevación de piso de seno maxilar (traumática/ventana lateral) injerto óseo con OsseoBone (Beta fosfato tricálcico) y membrana de Colágeno en zona de 26.
- Tipo y talla de implante: ZinicMT ø4*11,5mm

- Gender: Male
- Age: 36 years old
- Treatment: Sinus lift (traumatic/lateral window) with immediate implant placement bone grafting with OsseoBone (Beta-tricalcium phosphate) and collagen membrane in the 26 position.
- Type and implant size: ZinicMT ø4*11,5mm



Zinic[®]MT

ANÁLISIS FACIAL / FACIAL ANALYSIS



Análisis de sonrisa / Smile analysis

EVALUACIÓN INTRABUCAL / CLINICAL EVALUATION


EVALUACIÓN INTRABUCAL / CLINICAL EVALUATION




EVALUACIÓN INTRABUCAL / CLINICAL EVALUATION



ORTOPANTOMOGRAFÍA / PANORAMIC RX

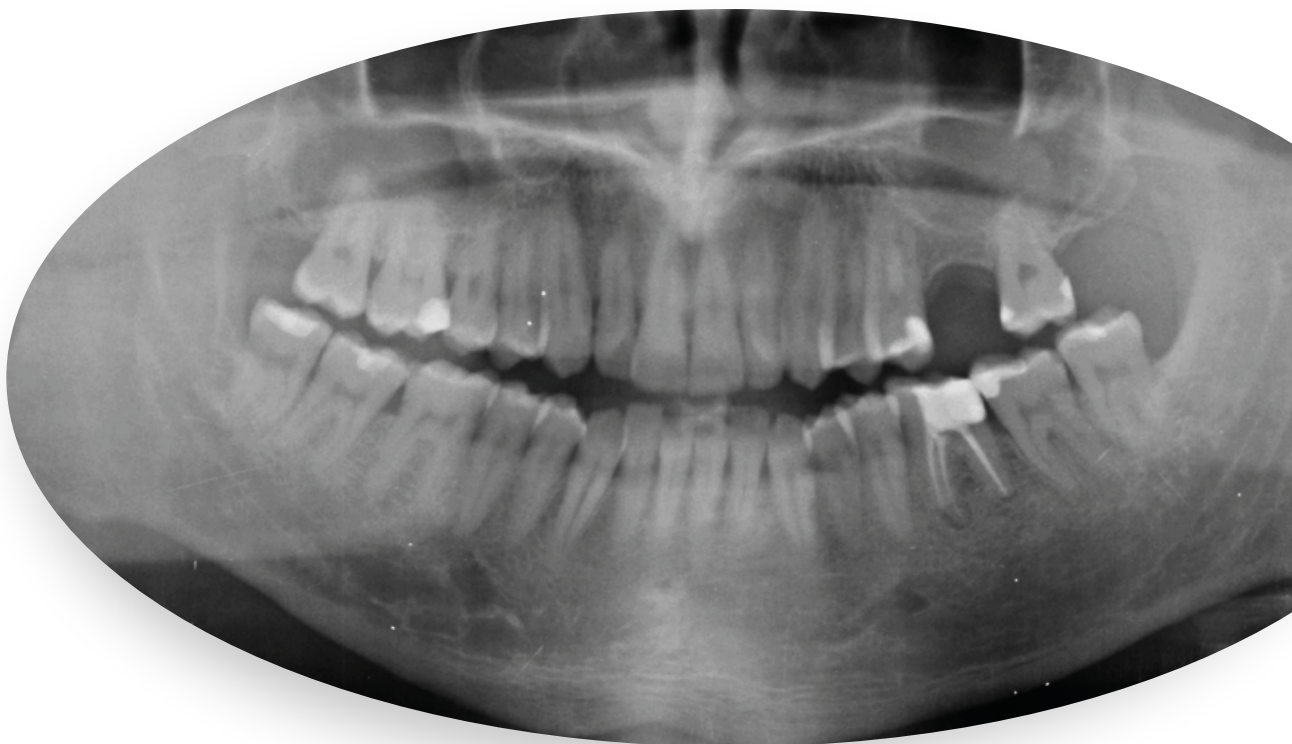

CBTC CORTE AXIAL / CBCT AXIAL SECTION

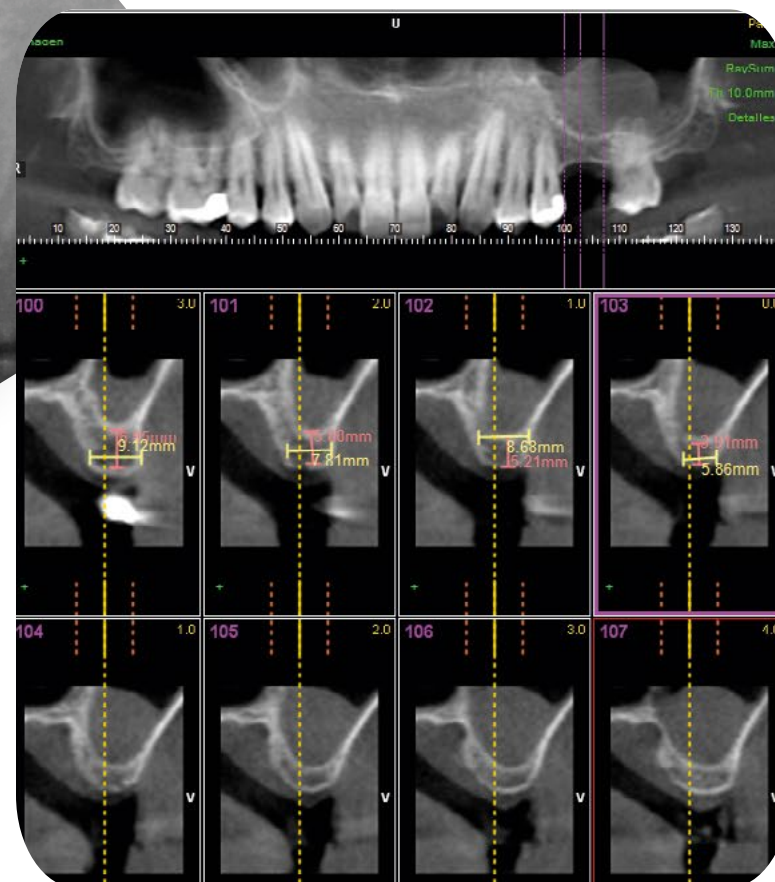



Colocación de implante inmediata elevación de piso de seno maxilar



Levantamiento de colgajo
/ Flap reflection



Osteotomía lateral para levantamiento sinusal /
Lateral window osteotomy for sinus lift

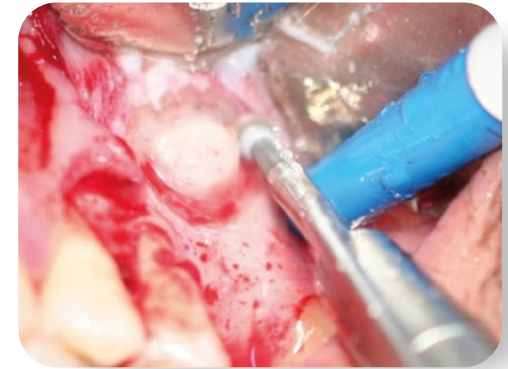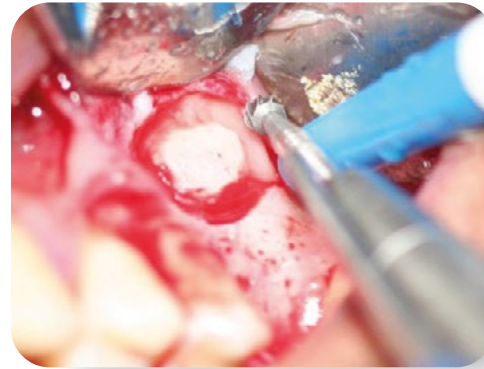

Elevación de la membrana sinusal
/ Elevation of the schneiderian membrane




Secuencia de fresado
/ Surgical drilling




Insertión mecánica de implante
/ Contra-angle implant Placement

Colocación de implante inmediata elevación de piso de seno maxilar

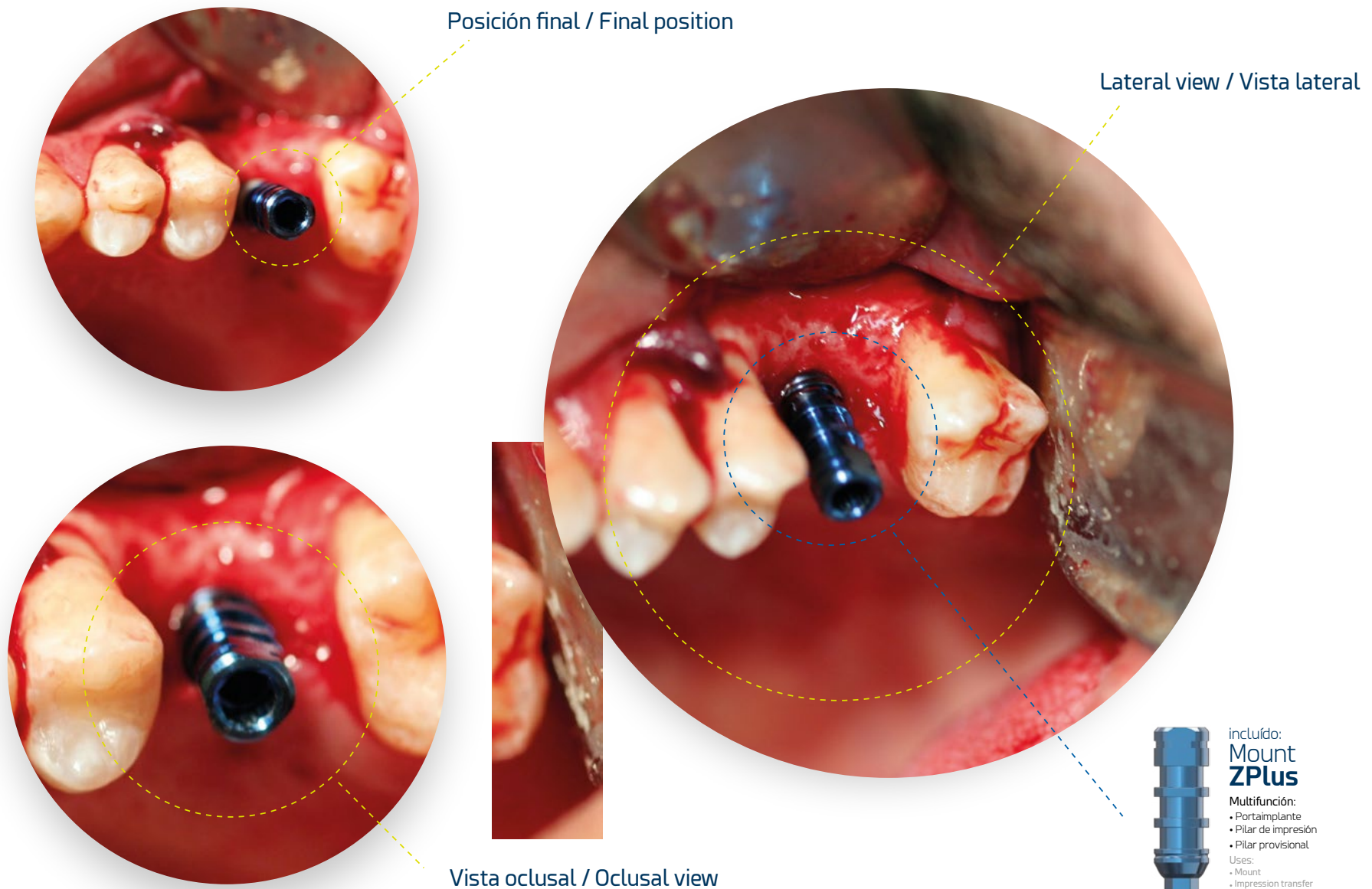


Colocación de implante inmediata elevación de piso de seno maxilar

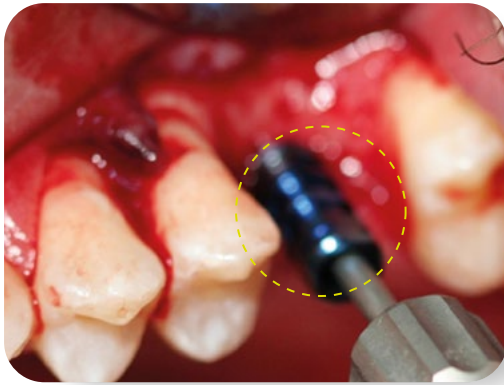


Retiro de tornillo de ZPlus (mount) /
ZPlus (mount) screw removal



Implante colocado
/ Implant placed

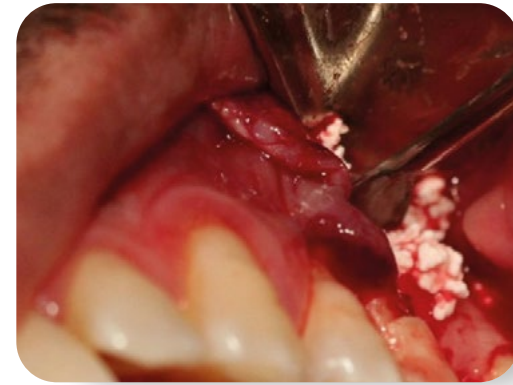

Injerto oseo
/ Bone grafting

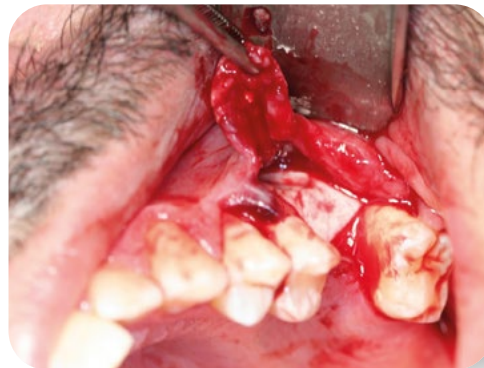

Membrana de colágeno
/ Collagen membrane



Sutura / Suture



Ziacom[®]

Together for **health**