



Instruções para a transferência e instalação das bibliotecas ZIACOM para 3shape

Descarregar software

No computador, abra o navegador e introduza o seguinte url: www.ziacom.com

No menu FLUXO DIGITAL, vá para o separador Bibliotecas CAD/CAM > selecione 3Shape.

Clique em **3shape** 

Será descarregado um ficheiro chamado 3Shape.zip na pasta Transferências do seu computador.

Descompactar o ficheiro

Aceda à pasta Transferências do seu computador e descompacte o ficheiro chamado

3Shape.zip.


Para descompactar o ficheiro pode utilizar um descompactador online padrão como o 7-zip.

Quando descompactar o ficheiro, aparecerá uma pasta com os seguintes conteúdos:

- ZIACOM_D.IMPLANT(+0.05)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT(+0.10)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT(+0.15)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT(-0.05)_1.0.dme
- ZIACOM_D.IMPLANT_1.0.dme
- ZIACOM_TIBASE(+0.05)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE(+0.10)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE(+0.15)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE(-0.05)_2.1.dme
- ZIACOM_TIBASE_2.1.dme

Importação de bibliotecas


1. Abra o Painel de Controlo do 3Shape a partir do acesso direto ou do Dental Manager (ícone da engrenagem nos dois casos).

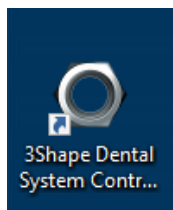

2. De seguida, clique na opção “Importar/Exportar” (Importar/Exportar) no menu Ferramentas




3. Uma vez dentro da opção, clique no botão “Importar materiales” (Importar materiais)

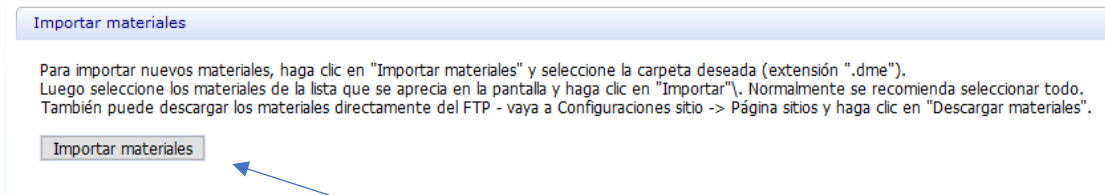


4. Agora deverá selecionar o ficheiro de que necessita na pasta descompactada que descarregou.

	ZIACOM_D.IMPLANT(+0.05)_1.0.dme	28/11/2022 9:14	Archivo DME	4.246 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT(+0.10)_1.0.dme	28/11/2022 9:15	Archivo DME	4.246 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT(+0.15)_1.0.dme	28/11/2022 9:17	Archivo DME	4.247 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT(-0.05)_1.0.dme	28/11/2022 9:18	Archivo DME	4.247 KB
	ZIACOM_D.IMPLANT_1.0.dme	28/11/2022 9:12	Archivo DME	4.249 KB
	ZIACOM_TIBASE(+0.05)_2.1.dme	28/11/2022 9:22	Archivo DME	20.801 KB
	ZIACOM_TIBASE(+0.10)_2.1.dme	28/11/2022 9:23	Archivo DME	20.697 KB
	ZIACOM_TIBASE(+0.15)_2.1.dme	28/11/2022 9:25	Archivo DME	20.699 KB
	ZIACOM_TIBASE(-0.05)_2.1.dme	28/11/2022 9:26	Archivo DME	20.698 KB
	ZIACOM_TIBASE_2.1.dme	28/11/2022 9:20	Archivo DME	20.707 KB

5. Depois será apresentada a janela seguinte, onde deverá clicar no botão “Importar” (Importar).

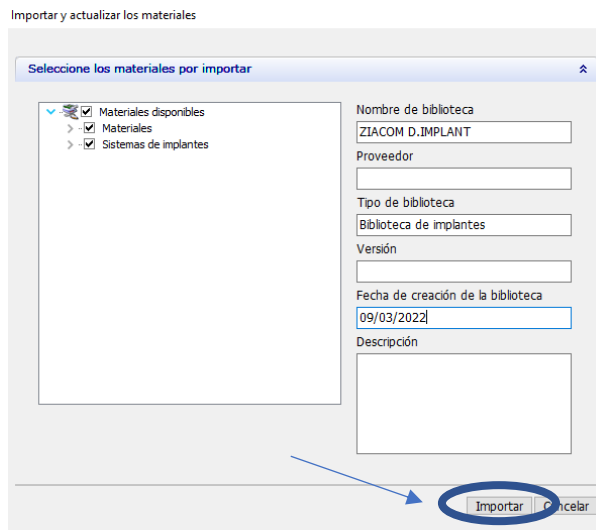

6. Quando terminar o processo aparecerá uma janela onde deve selecionar o botão “Aceptar” (Aceitar).

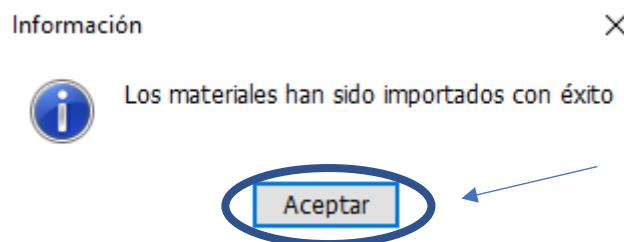

- Quando terminar, clique no botão guardar na parte superior esquerda do ecrã (ícone do disco).



- Na seguinte janela clique em “Sí” (Sim) para confirmar que deseja guardar.

Confirmar guardar

